

【AE-4020、AE-4021】
反射率測定方法・再印字方法説明書

【AE-4020、AE-4021】

■反射率測定方法

- 1) 電源スイッチを入れ、待機画面が表示されるまで待ちます。



- 2) 測定結果形式の設定を行います。

1 メニュー画面を呼び出す

【待機画面】で を押します。


【メニュー画面】が表示され、 が点滅表示されます。

2 SETUP(ユーザ設定)メニューを選択する

または を押し、 を点滅表示させます。

を押します。

【項目 No. 入力画面】が表示されます。

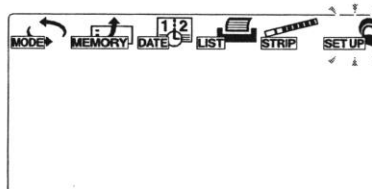



3 項目 No. を指定する

数値キーで項目 No. を入力します。

を押します。

を押します。

通常測定 of 【測定結果形式設定画面】が表示されます。

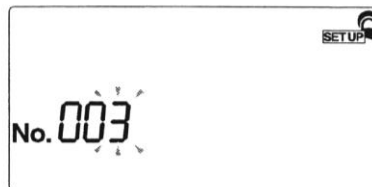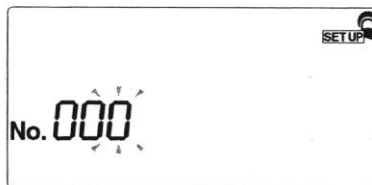

4 通常測定の測定結果形式を設定する

数値キーを押して、通常測定の測定結果形式を選択します。

0: 半定量値


1: 反射率

を押します。

を押します。

を押します。

(が表示され、ピッと音が鳴ります)

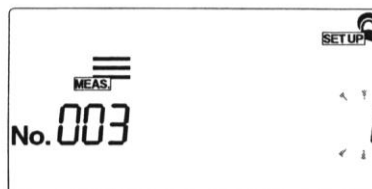

5 終了する

を2回押します。

【待機画面】にもどります。

(注意) 精度管理用試料の測定後、通常の状態（半定量での打ち出し）に復帰するためには、同様の手順で測定結果形式「0:半定量値」を選択してください。

■再印字方法

(注意) 精度管理用試料の測定後、反射率設定説明書(P1)を参考に、測定結果形式を「0:半定量値」に戻してから再印字を行ってください。

- 1) 電源スイッチを入れ、待機画面が表示されるまで待ちます。



1 メニュー画面を呼び出す

【待機画面】で を押します。


【メニュー画面】が表示され、 が点滅表示されます。

2 MEMORY(測定結果の再印字・再送信)メニューを選択する

または を押し、 を点滅表示させます。

を押します。

【出力方法選択画面】が表示されます。

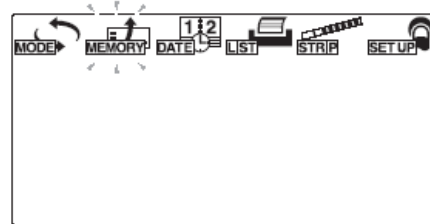

3 出力方法を選択する

または を押し、選択したい出力方法を点滅表示させます。


:再送信

:再印字

再印字を選択
してください。

を押します。

出力方法が確定され、【測定日範囲開始日付入力画面】が表示されます。

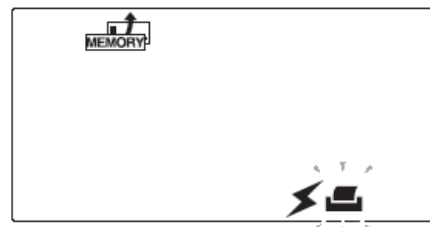


4 測定日範囲開始日付を指定する

で点滅表示を移動させながら、再印字・再送信する測定日範囲の開始日付を数値キーで入力します。

入力できる年/月/日が点滅表示されます。

を押します。

測定日範囲開始日付が確定され、【測定日範囲終了日付入力画面】が表示されます。

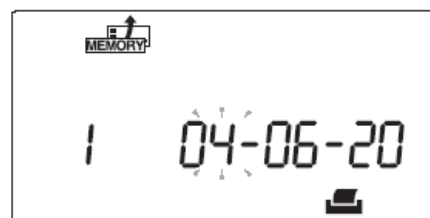

5 測定日範囲終了日付を指定する

◀で点滅表示を移動させながら、再印字・再送信する測定日範囲の終了日付を数値キーで入力します。

入力できる年/月/日が点滅表示されます。




▶を押します。

測定日範囲開始日付が確定され、【測定モード選択画面】が表示されます。

6 測定モードを選択する

◀または▶を押し、選択したい測定モードを点滅表示させます。

ALL : 以下の3種類の測定
MEAS : 通常測定
STAT : STAT測定
CONT : コントロール測定

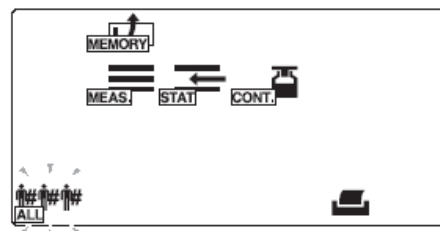

▶を押します。


ALL、CONTを選択した場合は、【測定結果種類選択画面】が表示されます 手順9へ進みます。

MEAS、STATを選択した場合は、【検体選択画面】が表示されます。次の手順7へ進みます。

7 検体を選択する

◀または▶を押し、

No. : 測定番号範囲を選択します。

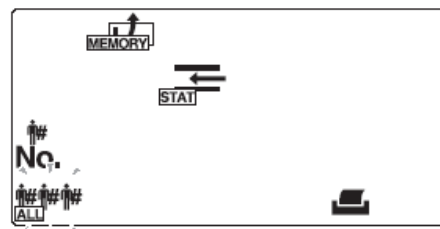

▶を押します。


No.を選択した場合は、【測定番号設定画面】が表示されます。

8 測定番号範囲を指定する

①で開始測定番号と終了測定番号を切り替え、
数値キーで開始測定番号と終了測定番号を入力
します。

②を押します。

入力した測定番号範囲が確定され、【測定結果
種類選択画面】が表示されます。

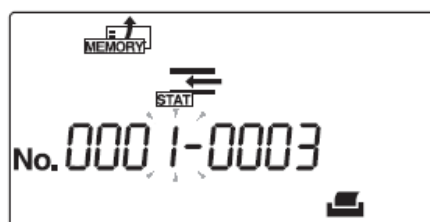


9 検索結果の種類を選択する

③または④を押し、選択したい測定結果を
点滅表示させます。

ALL : すべての測定結果

を選択します。

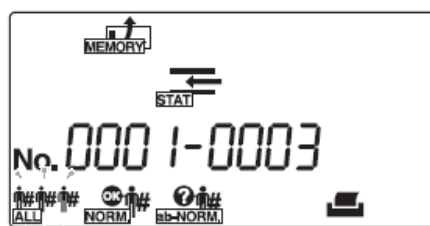


⑤を押します。

選択した測定結果が検索され、印字・送信されます。
印字・送信が終了すると、【メニュー画面】にもどります。

参考

- ・再印字・再送信を中止したいときは、⑥を押してください。再印字・再送信は中止され、【メニュー画面】にもどります。
- ・選択した測定結果がないときは、右の画面の【未検出画面】が表示されます。このときは、⑦を押して、【メニュー画面】にもどります。

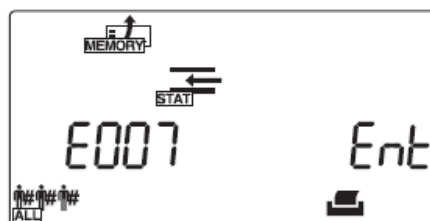

10 終了する

⑧を押します。

【待機画面】にもどります。