

Plus Talk™

プラストーク™

GO-9650 取扱説明書

はじめに

このたびは、GT-1830（自己検査用グルコース測定器）専用音声出力装置プラストーク GO-9650 をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書には、プラストークをご使用するための操作方法と注意点が書かれています。
- お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しい操作で本装置を使用してください。
- あわせて、指定の自己検査用グルコース測定器（GT-1830）、に付属の添付文書および取扱説明書もお読みになり、注意事項をお守りください。
- この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せる場所に保管してください。


EMC適合

本装置は、EMC 適合規格 JIS C1806-2-6:2012 に適合しています。
特記事項：エミッションの分類 クラス B


- ・乾燥した環境で本装置を使用すると、特に合成素材(合成繊維製衣服、カーペット、その他)が身近にある場合は、妨げとなる静電放電を誘発することがあり、誤った音声を出力することがあります。
- ・放射源が正確な動作を妨げることがあるため、本装置は、強い電磁放射源の間近で使用しないでください。

取扱説明書のプラストーク及び測定器 GT-1830 のイラスト表示は簡略化してありますので、実際とは異なります。

梱包品の確認

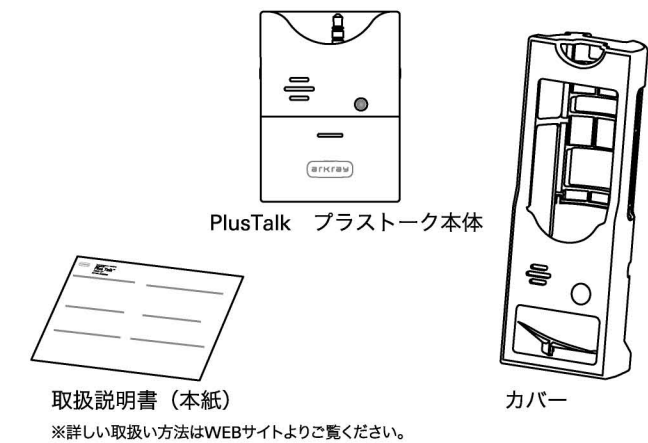

各部名称

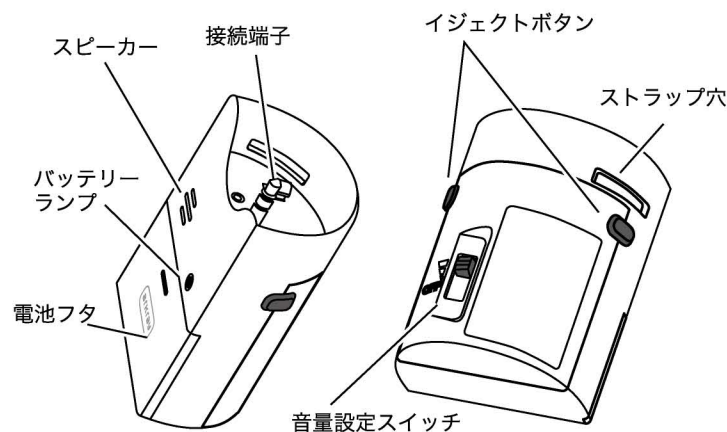

表記記号について

この取扱説明書では、注意していただきたい事項に以下の表記記号をつけています。

- 警告** 記載事項を守らないと、使用者または周囲の人が命の危険にさらされることがあります。
- 注意** 記載事項を守らないと、使用者または周囲の人がけがをしたり、物的損傷を受けることがあります。
- 重要** 正しい操作のために、おぼえておいていただきたい情報です。本装置の故障につながる取り扱い、および機能の正しい使用方法について記載しています。
- 参考** 知っておくと便利な情報が記載されています。

PlusTalk（プラストーク）とは

プラストークは、弊社指定の自己検査用グルコース測定器 GT-1830（以下 GT-1830）にセットして使用することにより、音声で確認しながら GT-1830 を使用するためのオプションユニットです。

- ・弊社製品の GT-1830 の操作がわかりにくい、表示が見えにくい方のために日付と時刻、操作方法、結果、過去の測定結果、GT-1830(測定器)の動作状態などを音声ガイドします。

【対応機種】

- ・ GLUCOCARD G Black
- ・ グルテスト Neo アルファ


使い方

出荷時の状態

本装置は出荷時よりカバーが装着された状態で梱包しています。


接続方法（GT-1830）

- 1 カバーの前面から GT-1830 を挿入します。

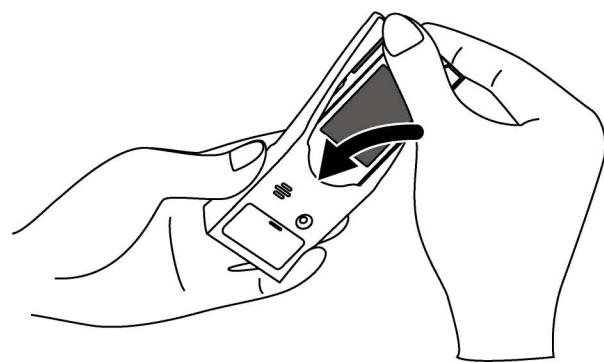

- 2 接続端子をあわせ、ボタンが「カチッ」となるまで押し込みます。

自動的に電源が入り、初期設定を行います。電源が切れると、初期設定は完了です。

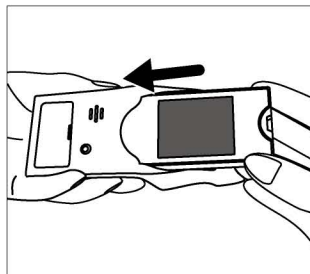


- 重要** 接続後、（数秒で）電源が切れない場合や操作しても音声が出力されない場合、初期設定が完了していない可能性があります。もう一度抜き差ししてください。

使用上の注意



警告

使用済みの電池を加熱したり、火に投げ入れたりしないでください。破裂してけがを負うおそれがあります。使用済みの電池はお住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。

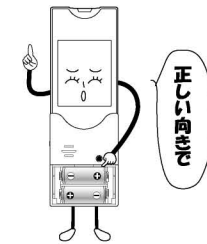

注意

電池は正しい向きに入れてください。故障の原因になります。




注意

水の中に落としたり、内部に水分が流入した装置はたとえ乾燥させたあとでも使用しないでください。装置が誤動作することがあります。



注意

スピーカーや本装置と GT-1830 の接続部に、血液や水分、ほこりなどを入れないでください。故障の原因になります。装置が汚れたときは、水で湿らせたやわらかい布をかたく絞ってふいてください。

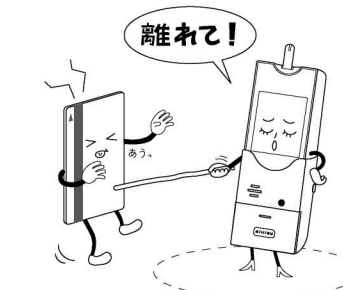


注意

スピーカーにクレジットカードなどの磁気の影響を受けるものを近づけないでください。正しく使用できなくなることがあります。

注意


航空機内への持ち込みは、航空会社の指示に従ってください。本装置からの電磁波などが計器類に影響を与えるおそれがあります。

- 3 カバーの天面を引っ張り、GT-1830 の天面にかぶせます。

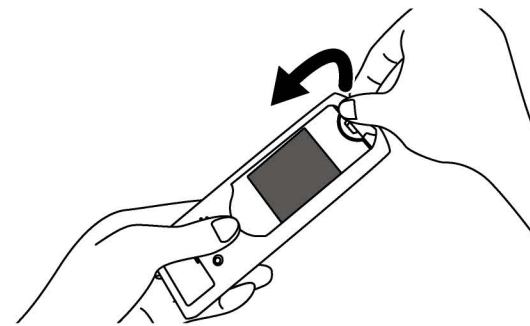


取り外し方法


- 1 ストラップを付けられている場合、ストラップをを外します。
- 2 カバーの天面を引っ張り、カバー前面から GT-1830 天面を出します。

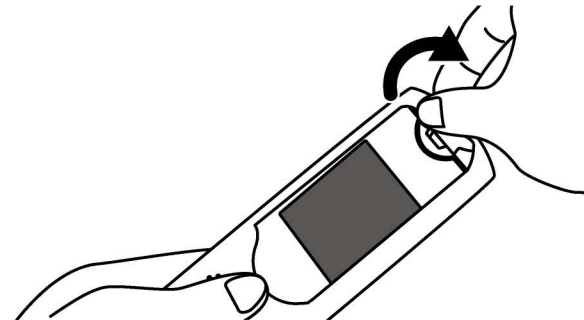

- 3 オプションのイジェクトボタンを 2 箇所同時に押しながら GT-1830 を引き抜きます。

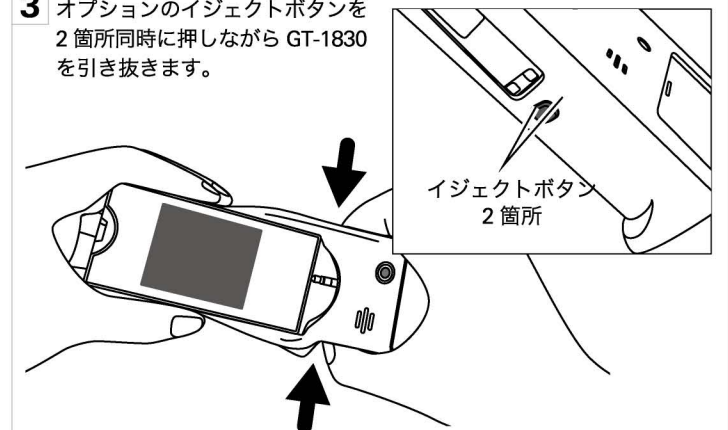

- 4 プラストークをカバーから取外す場合は、カバー前面からプラストークを引っ張りぬいてください。

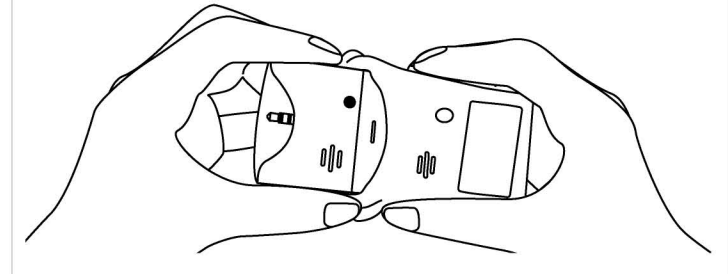

注意

カバーは薄く切れやすいので、必要以上に引っ張らないでください。

音量設定

音声ガイドの声の大きさを設定します。
音量は切替スイッチで4段階（OFF・1・2・3）の設定ができます。

音声

3：『音量 3 です』
2：『音量 2 です』
1：『音量 1 です』
OFF：×

重要 OFF 設定時、音声は聞こえなくなりますが、電源が OFF になるわけではありません。
OFF にすると、音声は聞こえなくなります。次回の測定時も音声は聞こえませんので、注意してください。

測定方法

1 センサーを挿入します。
自動的に電源が入り、日付と時刻を知らせます。
音声『〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分です』

2 血液を吸引させます。
音声『血液を吸引させてください』

3 血液を吸引すると測定が開始されます。
音声『測定を開始します』

4 測定結果が表示されます。
音声『〇〇です』

5 センサーを廃棄します。
音声『センサーが廃棄されました 電源を OFF にします』

重要 記載の測定方法は通常測定での一例です。
他の詳しい音声ガイド等については下記 WEB サイトよりご確認ください。
URL：http://www.arkray.co.jp/smbg

測定には GT-1830 付属の取扱説明書にしたがってください。

重要 測定器の時間表示が「12 時間表示」に設定されていても、音声ガイドは 24 時間表現となります。

電池残量 / 交換方法

電池残量に応じて交換時期になると、GT-1830 の電源が ON されるとランプが点滅します。

音声『プラストークの電池残量が少なくなりました。新しい電池の準備をお願いします』

重要 点灯・点滅は GT-1830 と接続し、かつ電源 ON 時のみです。

参考 消灯（動作不可）状態時は音声ガイドができません。

1 電池フタをはずします。
カバー下面をひっぱり、(a) の位置を少し押さえながらスライドしてはずします。

2 古い電池を取り出し、新しい電池と交換してください。

注意 電池は＋側と－側が図の向きになるように入れてください。

重要 電池は 2 個同時に新しいものに交換してください。

3 電池フタを閉めます。
図の方向にスライドさせてください。
その後、カバーを元の位置にかぶせてください。

製品仕様

項目	仕様
音声出力	出力部品：スピーカ / 言語：日本語
表示	バッテリーランプ：緑色 LED [点灯 (充分) 点滅 (交換) 消灯 (動作不可)]
操作	音量 0(OFF) ～ 3 [4 段階切替スイッチ]
外部通信	なし
電池	単 5 アルカリ乾電池 2 個
電圧	3V
消費電力	0.9W
使用環境	温度：0 ～ 45℃ 湿度：20 ～ 80%(結露しないこと)
保存環境	温度：0 ～ 50℃ 湿度：20 ～ 80%(結露しないこと)
電池寿命	約 1000 測定
外形寸法	45 mm × 62 mm × 30 mm (GT-1830 接続時 45 mm × 131 mm × 30 mm) (カバー装着時 48 mm × 133.5 mm × 33 mm)
重量	80g (カバー・電池含む)

参考 プラストークは電池を装填して出荷しておりますので、すぐに測定を開始していただけます。ただし、出荷時に装填された電池はサンプル用のため、記載の電池寿命を保証できません。

参考 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証規定

- 保証期間内（ご購入日より 1 年間）に正常な使用状態において、万一、故障した場合には無料で修理いたします。
- 次のような場合には保証期間内であってもこの限りではありません。
A) 使用上、取り扱い上の濫用、過失または事故などによる故障および損傷。
B) 不当な修理、部品や回路などを改造された場合。
C) ご購入後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
D) 火災、地震、水害、公害、異常高圧、指定以外の乾電池および、その他の天災地変などによる故障および損傷。
E) 保証書のご提示がない場合。
F) 本保証書の所定事項の未記入あるいは記載内容を書き換えられた場合。
G) その他、ご使用者側の責任から生じた故障。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

この製品は厳密な品質管理および検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、ご購入日より 1 年間の期間、本保証記載内容により無償修理いたします。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

保証書

品 名	PlusTalk プラストーク GO-9650
Serial No.	
住 所	TEL () -
名 前	ふりがな
購 入 日	