1.5 インストールと接続

唾液検査結果シート作成プログラムは、本装置の測定結果を受信して、結果シートを作成する ためのパソコン用ソフトウェアです。

1.5.1 **■** 唾液検査結果シート作成プログラムをインストー ルする [Windows編]



Windowsパソコンをご使用の場合は、以下の手順にしたがって唾液検査結果シート作成プログラムをインストールしてください。

準備するもの:USBメモリ(付属品)

● USBメモリをパソコンのUSBポートに接続します。

2 USBメモリ内の「Windows版_唾液検査結果~.exe」をパソコンのデスクトップにコピーし、 ダブルクリックします。

・インストーラ画面が表示されます。

3 [Next] をクリックします。



④利用規約をお読みいただき、[Ⅰ Agree]をクリックします。



⑤ [Destination folder] でインストール先のフォルダー名を確認し(a)、[Next] をクリックします(b)。

	📲 唾液検査結果シート作成プログラム Installation 💿 💷 🗾	
	Choose Install Location Choose the folder in which to install 唾液検査結果シート作成 プログラム.	
	Setup will install 唾液検査結果シート作成プログラム in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue. At least 45.13 Mb of free disk space is required.	
a ———	Destination folder C:¥arkray¥❶重液検査結果シート作成プログラム Browse	変更するには、 [Browse…]を クリックします。 保存先を選択し、 [OK]をクリック します。
	Copyright @ 2015, arkray	b

● スタートメニューに追加するフォルダー名を確認し(a)、[Next] をクリックします(b)。
 ・ このフォルダーにショートカットが保存されます。

	Select shortcuts	
	Choose a Start Menu Folder for the 唾液検査結果シート作 プログラム shortcuts.	
	Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortcuts. You can also enter a name to create a new folder.	
a ——	● 「唾液検査結果シート作成プログラム ー	フォルダー名を
	Accessories	
	Administrative Tools Maintenance	- こともできます。
	Startup	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ンヨートカットを 佐成したいときけ		
チェックマーク	Convright @ 2015. arkray	
ケエ ノノ 、 ノ をつける		- h

⑦ショートカットを作成する場所を選択し、[Next]をクリックします。

🛃 唾液検査結果シート作成プログラム Installation 🛛 🕞 💷	
Select shortcuts Select additional shortcuts.	
Select any additional shortcuts for 唾液検査結果シート作成プログラム that you would like created by the installation:	
4 <u>***</u>	デスクトップに 作成
Create a Desktop icon]
🕼 Create shortcut in start menu	
	ー スタートメニュー に作成
Copyright @ 2015, arkray	

⑧ 設定を確認し、[Install] をクリックします。

🛃 唾液検査結果シート	作成プログラム Installation		
<u>a</u> ,	Ready to Install Setup is now ready to begin inst 成プログラム on your computer.	alling 唾液検査結果シート作	
Click Install to continu settings.	e with the installation, or click Back if you w	ant to review or change any	
Destination folder: C:¥arkray¥唾液検:	査結果シート作成プログラム		
Start Menu Folder: 唾液検査結果シー)	Start Menu Folder: 唾液検査結果シート作成プログラム		
Additional shortcuts:			
Create a Desktop id Create shortcut in	on start menu		
Copyright @ 2015, arkr	3y	Instal	

・インストールが開始されます。

Microsoft .NET Framework 4 t	zットアップ	
.NET Framework 4 セットアップ 続行するには、ライセンス条項に同	意してください。	NET
マイクロソフト ソフトウェア	追加ライセンス条項	^
MICROSOFT WINDOWS	オペレーティング システム用 MICROS	SOFT .NET
▼同意する(A)		
推定ダウンロード サイズ	0 MB	
推定ダウンロード時間	ダイヤルアップ:0分	
	ブロードバンド0分	
		L=11(0) (+= w ++ 11)

①ライセンス条項をお読みください。次に[同意する]にチェックマークを入れ、[インストール]
 をクリックします。インストールが開始されます。

②「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。



Microsoft SQL Server Compact セットアップ画面が表示された場合



① [次へ] をクリックします。

②使用許諾契約書をお読みください。次に[同意する] にチェックマークを入れ、[次へ] をクリックします。

- ③ [インストール] をクリックします。インストールが開始されます。
- ④「セットアップの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。

⑨以下の画面が表示されたら、[Finish]をクリックします。



参考 以下の画面が表示された場合 Microsoft .NET Framework 4 セットアップ へストールを完了するには、コンピューターを再起動する必要があります。後で再起動する 場合は、NET Framework に依存するアプリケーションが動作しなくなる可能性があります。

[今すぐ再起動]をクリックして、パソコンを再起動します。

 デスクトップに右図のショートカットアイコンが 作成されていることを確認します。

・ 手順 6 でショートカットを作成しないように設定した場合は、このアイコンは表示されません。

① USBメモリをパソコンから取りはずします。



→1-19ページ「1.5.3. 装置・パソコン・プリンタを接続する」に進みます。

1.5.2 **■** 唾液検査結果シート作成プログラムをインストー ルする [Mac編]



Macをご使用の場合は、以下の手順にしたがって唾液検査結果シート作成プログラムをインス トールしてください。

準備するもの:USBメモリ(付属品)

● USBメモリをパソコンのUSBポートに接続します。

2 USBメモリ内の「Mac版_唾液検査結果~.pkg」をパソコンのデスクトップにコピーし、ダブ ルクリックします。

・インストーラ画面が表示されます。

③[続ける]をクリックします。

	ようこそ 唾液検査結果シート作成プログラム インストーラヘ	
 はじめに 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	このソフトウェアをインストールするために必要な手順が表示さ れます。	
	戻る 続ける	

④ 使用許諾契約をお読みいただき、[続ける] をクリックします。

	使用計論笑約
けいめに	日本語
使用許諾初約	利用規約
コンストール元	第1条 規約の目的
インストールの種類	アークレイ株式会社(以下、「当社」という)が利用者に提供する
インストール	「唾液検査結果シート作成プログラム」(以下、「本アプリケーション」という)の利用について定めたものです。本担約をよくお読みの
概要	うえ、本規約に同意される場合に限り、本アプリケーションをご利用 いただけます。なお、本アプリケーションの使用者(以下「利用者」 と呼びます)は、「I Agree」(または「同意する」)パタンをプリ ックした時点で、本規約に同意したものとみなします。
	第2条本規約の適用 本規約は、利用者が本アプリケーションを利用する一初の場合に適用 されるものとします。なお、当社は、必要に応じて本規約の内容を随 時任意に変更できるものとします。その場合、当社は最新の本規約を

⑤[同意する]をクリックします。



⑥[インストール]をクリックします。

•••	垂液検査結果シート作成プログラム のインストール
	"Macintosh HD"に標準インストール
 はじめに 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	この操作には、コンピュータ上に 18.2 MB の領域が必要です。 ディスク"Macintosh HD"にこのソフトウェアを標準インストー ルするには、"インストール"をクリックしてください。
	インストール先を変更 戻る インストール

- ⑦[ユーザ名] と[パスワード] を入力し(a)、[ソフトウェアをインストール] をクリックします(b)。
- ・インストールが開始されます。



8以下の画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。

•••	▶ 唾液検査結果シート作成プログラム のインストール
 はじめに 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール インストール 概要 	電波検査結果ジート作成プログラム のイジストール インストールが完了しました。 インストールが完了しました。 リフトウェアがインストールされました。
	戻る 閉じる

⑨デスクトップに以下のショートカットアイコンが作成されていることを確認します。



● USBメモリをパソコンから取りはずします。

→1-19ページ「1.5.3. 装置・パソコン・プリンタを接続する」に進みます。

1.5.3 装置・パソコン・プリンタを接続する

1 接続する

● 付属のUSBケーブルを使用して、装置をパソコンに接続します。

・パソコンとプリンタの接続については、お使いの各製品の説明書をお読みください。



2 装置の初期設定をする

●パソコンで、唾液検査結果シート作成プログラムが起動していないことを確認します。

2 電源スイッチを長押しします。

- 「ピッ」と鳴って画面が点灯したら、指をはなします。
- 試験紙ホルダが出てきます。



もう一度「ピッ」と鳴り、トップメニュー画面が表示されます。



③ 電源スイッチを長押しし、試験紙ホルダが動きだしたら、指をはなします。

- ・試験紙ホルダが収納されます。
- ・画面が消灯し、電源が切れます。



1.5.4 【装置ソフトウェアの自動バージョンアップ



装置のソフトウェアをバージョンアップする必要がある場合には、唾液検査結果 シート作成プログラムの画面にメッセージが表示されます。

- ●パソコンと装置をUSBケーブルで接続した状態で、唾液検査結果シート作成プログラムを起動します。
- 2 装置の電源を入れます。この時に、パソコンに以下の画面が表示された場合は、手順③に進み装置のソフトウェアをバージョンアップしてください。

バージョンアップの途中でエラーやトラブルが発生した場合は、唾液検査結果シート作成プログラム、装置を再起動して手順❸から再度実施してください。

接続された装置のソフトウェアをバージョンアップする必要があります。 装置の電源をお切りください。
OK ++>tell

3 装置の電源を切り、手順2のパソコンの画面で [OK] をクリックします。

④ パソコンに以下の画面が表示されたら、再度、装置の電源を入れます。





装置の電源を入れてから1分以上、次の画面が表示されない場合、USBケーブルが正しく接続されているか確認し、再度装置の電源を入れなおしてください。

⑤ 自動的に以下の画面がパソコンに表示され、装置ソフトウェアのバージョンアップが始まります。





⑥ バージョンアップが完了すると、パソコンに以下の画面が表示され、自動的に装置の電源が 切れます。



⑦ 手順 ⑥のパソコンの画面で [OK] をクリックした後、再度、装置の電源を入れてください。 パソコン、装置ともトップメニュー画面が表示されます。



3.5.1 結果データをエクスポートする

パソコンに保存されている結果データをまとめてエクスポートします。このデー タを他のパソコンにインポートすることで、患者の検査結果などのデータ、医院 名、医師名、コメントなどをそのまま利用することができます。

結果データのインポート: 3-15ページ「3.5.2. 結果データをインポートする」参照 参考



●トップメニュー画面から [データ管理] → [取出し] の順にクリックします。

②[保存先(To)]に、データの保存先を指定します。

フォルダーの一覧から選択するには 「…」をクリックします。[フォルダーの参照]画面で保存先のフォルダーを選択し、[OK]をクリックします。

③ [開始] をクリックします。

④「エクスポートは成功しました。」と表示されたら、[OK] をクリックします。・これでエクスポートは完了です。



3.5.2 結果データをインポートする



結果データをインポートします。他のパソコンからエクスポートしたデータをインポートすることで、入力済みの医院名、医師名、コメントなどを流用することができます。



- ●トップメニュー画面から[データ管理]→[結果データ読込み]の順にクリックします。
- 2 [読込先 (From)] に、エクスポートファイルが保存されているフォルダー(名称は [唾液検 査結果データ(年月日)])を指定します。
- フォルダーの一覧から選択するには 参考 […]をクリックします。[フォルダーの参照]画面でフォルダーを選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [開始] をクリックします。
- ④「インポートは成功しました。」と表示されたら、[OK]をクリックします。
- ・これでインポートは完了です。